

医用外固定夹板

产品名称	医用外固定夹板
生产厂家	郑州凯斯特医疗器械有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环路279号13幢7层27号房
联系电话	19939355852

产品详情

医用外固定夹板

产品详情



使用范围:

用于骨科、整形外科

作骨折固定,矫形用

特点

- 1、舒适
- 2、规格多样
- 3、适用范围
- 4、具有矫形合成绷带的优点


使用方法：

- 1、根据需要固定的部位选择合适的规格。
- 2、打开包装取出夹板，通过夹板两侧(任意一侧)开口倒入常温水并保持两侧开口向上(如图一所示)

- 3、使夹板两侧开口上下轮流交替3-5次使夹板内部湿润均匀(如图二所示)
- 4、夹板一侧向下挤出多余水分(如图三所示)
- 5、将夹板覆盖在需要固定的部位，塑形后用纱布绷带或弹性绷带缠绕固定(如图四所示)

使用方法

INSTRUCTIONS

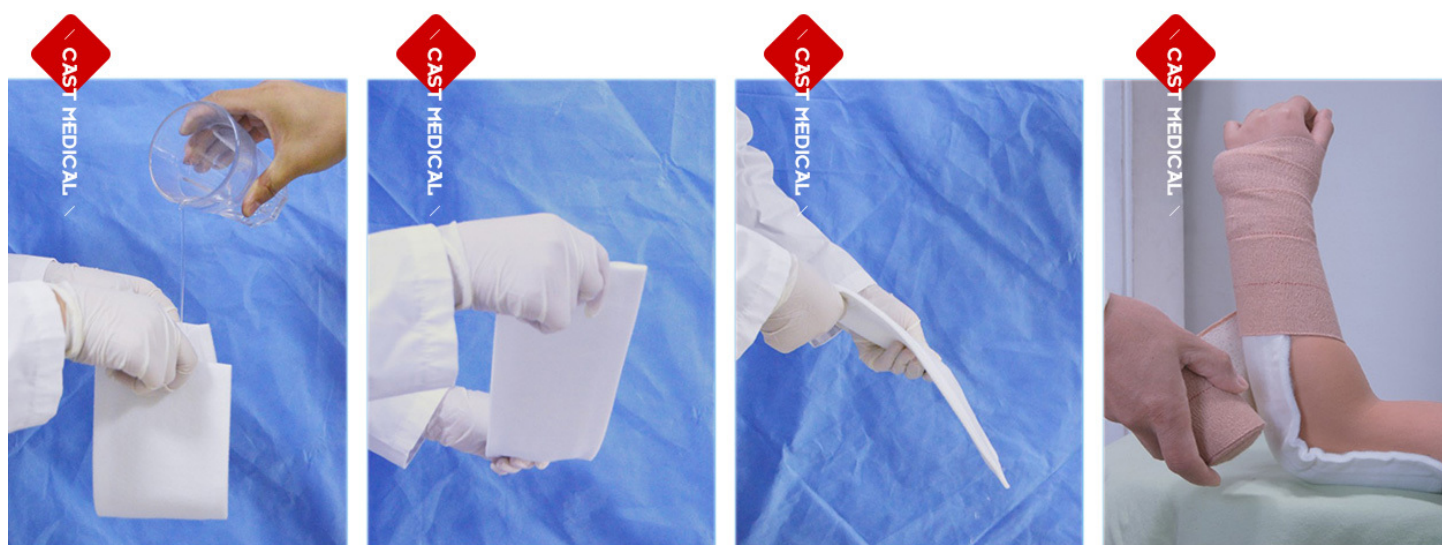

规格参数

SPECIFICATIONS

规格	尺寸	包装	适用部位
PrimeSplint™ 210	5.0cmX25cm	90卷/箱	儿童前臂
PrimeSplint™ 312	7.6cmX30cm	90卷/箱	儿童上肢
PrimeSplint™ 335	7.6cmX90cm	45卷/箱	上肢或小腿
PrimeSplint™ 415	10.2cmX40cm	90卷/箱	成人前臂
PrimeSplint™ 430	10.2cmX76cm	45卷/箱	成人小腿
PrimeSplint™ 530	12.7cmX76cm	45卷/箱	成人小腿
PrimeSplint™ 545	10.7cmX115cm	30卷/箱	成人下肢

