

## 排气口灭菌器排气口除菌箱

产品名称	排气口灭菌器排气口除菌箱
生产厂家	杭州佳洁机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	地址：杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园B幢）
联系电话	15757184369

## 产品详情

### 排气口灭菌器排气口除菌箱

负压除菌过滤器主要是采用超大面积的除菌滤芯，快装式结构，过滤精度为 $0.22\mu$   $0.01\mu$ ，使用121℃洁净蒸汽定期灭菌，能99.995%除去细菌及各种噬菌体。是医用中心吸引系统行业里必须的环节，除菌过滤器是负压空气除菌的选择。除菌过滤器采用304或316L不锈钢材质制造壳体，并配合镜面抛光，达到无寄生细菌死角。除菌过滤器的滤芯采用蒸汽灭菌的PTFE折叠滤芯。滤芯具有抗高压、高温、疏水、高密度特性。

### 安装与配置

安装时，必须按照过滤器上的空气进出口标签连接好管道。否则将进出口反装会严重影响过滤效果。为了便于使用和更换维修,过滤器应按下图所示的标准管线进行安装。

### 除菌过滤器的特点

(1) 除菌过滤器一般采用十字悬挂式，水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。



(2) 有些使用场合根据实际需要分成预过滤器、精过滤器两种。

(3) 空气流向：从外向内穿过滤芯，请根据壳体标签上箭头方向安装。

(4) 进入除菌过滤器的空气必须先经过储气罐稳压预过滤器，否则将影响除菌滤芯的寿命，达不到预期的除菌效果。

(5) 定期杀菌，根据实际使用情况每周1~2次，每次30分钟，采用经过 $1\mu$ 过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度 $< 121$ ，蒸汽压力 $< 0.3\text{MPa}$ 。阀门须缓慢开关。灭菌过程须专人看管。

(6) 经过100次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到 $0.07\text{--}1.0\text{MPa}$ 时，应更换新的除菌滤芯。

卫生级过滤器筒体全部采用304或316L不锈钢材料制造，每台过滤器都是经过严格的选材及精心制造而成，完全无裂缝的流线型设计，具有良好的表面和大的耐腐蚀能力，以达到防止细菌污染的质量标准，严格满足GMP标准要求。并且有完善的质量跟踪服务。卫生级过滤器套筒独特的结构，使每一个套筒的内外表面均没有死角、可完全拆洗，操作方便。

## 产品简介

医疗真空系统广泛应用于医疗和外科手术，提供及时可靠的吸引动力。在环境中，对污染越来越敏感

---

和对传染的防护使过滤成为这些系统的必需。

真空系统过滤的必要性已得到广泛普及。没有足够的入口过滤会损坏真空泵，破坏真空度，造成污染和设备停止工作。入口管路污染物包括颗粒，灰尘，水汽和其他气体。出口排放也会包括颗粒，油和有害气体。的入口和排气过滤器能有效处理这些污染物。

的除菌过滤对于任何的真空系统的管路和出口都存在携带大量病菌的危险，为了保护病人，医护人员，其他服务人员以及广大人民群众的健康，各国多年以前就提出安装和维护细菌过滤器。在真空泵前面不安装除菌过滤器或者不维护除菌过滤器，不但会损坏真空泵，而且会使真空泵成为细菌污染源。真空泵合适的温度和湿度是细菌生长的理想温床，从技术角度讲会使真空泵本身产生风险，导致更换真空泵。

应及时对除菌过滤器进行保养更换滤芯，以免压差过大影响系统流量

医用真空系统灭菌装置用于医用真空系统的除尘、灭菌消毒，灭菌器可快速有效杀灭真空系统排气中的细菌、病毒、真菌以及空气中常见的致病菌，解决真空机组排放气体污染环境的现状，同时还可消除废气中的微粒和异味，达到净化空气的作用。